

## دستور العمل شستشو و ضد عفونی نبولایزر

با توجه به اینکه نبولایزر با سیستم تنفسی مرتبط است جهت ضد عفونی آن به صورت زیر عمل شود:

۱- پوشیدن وسایل حفاظت فردی

۲- مخزن اصلی آب مقطر هر ۲۴ ساعت تخلیه شود و با گاز استریل خشک شود و تاریخ درج گردد. (ترجیحا" آب استریل استفاده شود)

۳- قطعه دهانی، درپوش ظرف دارو، پوشش عایق کننده درپوش، لوله تنفسی و دکمه های تنظیم دارو به ترتیب با الکل ضد عفونی گردد.

**دقت شود که ماده ضد عفونی کننده با فضای داخل دستگاه برخورد نکند و بخش هایی که دارو و بخار از آن عبور می کند با دست برخورد نداشته باشد.**

❖ لوله تنفسی به صورت هفته ای ضد عفونی سطح بالا شود.

نکته: در صورتی که بیمار مبتلا به سودوموناس از بخور استفاده می کند بایستی قطعات با محلول سطح بالا ضد عفونی و یا اتوکلاو گردد.



## دستور العمل شستشو و ضد عفونی ساکشن

جهت شستشو و ضد عفونی ساکشن به ترتیب ذیل عمل نمایید:

۱- پوشیدن وسایل حفاظت فردی (اگر بیمار سل ریوی دارد از ماسک فیلتر دار استفاده شود)

۲- جدا کردن مخزن از سیستم و کیوم و تخلیه مخزن در سینک مدیکال

۳- شستشوی سینک با آب فراوان و محلول دترجنت

۴- آب کشی مخزن با آب سرد و سپس با دترجنت و آب داغ

۵- آب کشی مجدد و خشک کردن باتل ساکشن

۶- غوطه ور کردن باتل در محلول ضد عفونی سطح متوسط (وایتکس یا ساولون)

۷- آبکشی نهایی و خشک کردن

۸- بدنه دستگاه در هر شیفت با الکل ۷۰ درصد ضد عفونی شود.

❖ فیلتر ضد باکتری در صورت تغییر رنگ قرمز یا مشکی شدن تعویض شود.

❖ در صورت عدم استفاده از ساکشن مخزن خشک باشد و کاتترها نباید متصل باشد.

**نکته:** در صورتی که بیمار مورد عفونی است یا ساکشن به خون بالای ۳۰ سی سی آلوده است از محلول ضد عفونی سطح بالا استفاده شود.

