

دستورالعمل استفاده از دستگاه نوکواسپری

دستگاه نوکواسپری که جایگزین لامپ های UV شده است برای ضد عفونی همزمان هوا، سطوح، تجهیزات پزشکی و ضد عفونی نقاط غیر قابل دسترس و خلل و فرجی که با ضد عفونی معمولی امکان پذیر نیست، به کار می رود و تا حجم ۱۰۰۰ متر مکعب را در حداقل زمان ممکن ضد عفونی می کند.

موارد استفاده:

- ❖ از بین بردن انواع باکتری ها از جمله توبرکلوزیس، انواع بیوفیلیم ها، قارچ ها
- ❖ ویروس ها: در بیماری هایی مانند سرخک، آبله مرغان، HIV- HCV- HIV-H1N1-CCHF
- ❖ اسپورها از جمله کلستریدیوم دیفیسیل (اسهال عفونی)، باسیل آنتراسیس (سیاه سرفه)

نحوه استفاده از دستگاه نوکواسپری:

قبل از استفاده از دستگاه، اتاق به طور کامل تمیز شود و دستگاه نوکواسپری در یکی از گوشه های اتاق قرار گیرد.

۱- در موارد روتین بعد از پایان روز کاری یا اتمام آخرین عمل، حجم اتاق (طول * عرض * ارتفاع) را محاسبه نموده و حجم کانال کولر یا هواساز که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مکعب هست را به حجم اتاق اضافه کنید.

توجه: در موارد عفونی ابتدا دریچه کانال ها را به طور کامل با کیسه مسدود نمایید و حجم اتاق را در ۲ ضرب کنید و پیچ تنظیم را روی عدد به دست آمده قرار دهید.

۲- اطمینان حاصل کنید که محلول **نانوسیل** در دستگاه وجود دارد. (هر ۱ سی سی محلول یک متر مکعب را ضد عفونی می کند)

۳- دستگاه را به برق وصل کرده و ابتدا دکمه سبز رنگ پشت دستگاه را روشن نمایید و سپس دکمه شروع را فشار دهید. دستگاه بعد از آلارم زدن شروع به کار می کند.

۴- از محیط خارج شوید. حدود نیم ساعت تا یک ساعت (در موارد عفونی) بعد از خاموش شدن دستگاه، اتاق قابل استفاده است.