

دستورالعمل شستشوی تشک موج آلوده به خون و ترشحات

در صورت آلوده شده تشک موج به خون، ترشحات و مواد دفعی بیشتر از ۳۰ سی سی به روش زیر عمل شود:

- ۱- پوشیدن وسایل حفاظت فردی
- ۲- تشک داخل کیسه زباله بزرگ گذاشته و به رختشویخانه منتقل شود.
- ۳- تشک داخل لگن مخصوص قرار گیرد.
- ۴- با آب فراوان آبکشی و با دترجنت شسته و آبکشی شود.
- ۵- سپس با وایتکس ضدعفونی شود.
- ۶- با آب فراوان آب کشی انجام شود.
- ۸- پس از خشک شدن مجدداً " رویه تشک با سار فوسپت یا محلول پراناسید مخصوص سطوح ضدعفونی شود.
- ۹- جهت چک کردن تحویل واحد محترم تجهیزات گردد.
- ۱۰- به بخش مربوطه اقدامات انجام شده گزارش گردد.

