

دستور العمل نحوه نگهداری آمبویگ

در بخش های عمومی :

- آمبویگ در زیپ کیپ نگهداری شود .
- بعد از هر بار استفاده، ضد عفونی سطح بالا انجام و زیپ کیپ تعویض شود.
- در صورت عدم استفاده ، بعد از آبکشی با آب ولرم به صورت ماهیانه، زیپ کیپ تعویض شود.

در بخش های ویژه و در مورد بیماران بدحال در همه ی بخش ها :

- آمبویگ در زیپ کیپ و بالای سر بیماران نگهداری شود .
- بعد از هر بار استفاده، ضد عفونی سطح بالا انجام و زیپ کیپ تعویض شود.
- در صورت عدم استفاده، بعد از آبکشی با آب ولرم به صورت هفتگی، زیپ کیپ تعویض شود.



دستور العمل نحوه نگهداری لارنگوسکوپ

- **اولویت اول:** نگهداری این تیغه ها در ظروف خاص قابل اتوکلاو است. بعد از هر بار استفاده از تیغه ها (و در صورت عدم استفاده به صورت هفتگی)، این نوع ظروف شستشو، ضد عفونی و استریل می شوند.
- **اولویت دوم:** استفاده از زیپ کیپ است. بعد از هر بار استفاده از تیغه ها، ضد عفونی سطح بالا انجام و در صورت عدم استفاده به صورت هفتگی تیغه ها با الکل ضد عفونی شده و زیپ کیپ تعویض گردد.



نکات مهم :

- ✓ تاریخ ضد عفونی، روی آمبویگ و لارنگوسکوپ قید گردد.
- ✓ ماسک مربوط به تهویه آمبویگ، بایستی پلاستیک شود.
- ✓ قبل از کنترل عملکرد آمبویگ و لارنگوسکوپ، بایستی دست ها هندراب شود.
- ✓ نگهداری آمبویگ و لارنگوسکوپ به هر صورت، به هیچ وجه نباید منجر به تاخیر در نجات جان بیمار شود.

