



Bohlool Hospital

دستورالعمل نحوه شستشو و ضد عفونی آمبویگ

آمبویگ به دلیل تماس با غشای موکوسی، خون و ترشحات بدن بیمار، از ابزار نیمه بحرانی

محسوب می شود و باید ضد عفونی سطح بالا برای آن صورت گیرد.



جهت شستشو و ضد عفونی آمبویگ طبق مراحل زیر عمل کنید:



۱. پوشیدن وسایل حفاظت فردی مناسب
۲. جدا کردن قطعات از یکدیگر
۳. شستشو با آب ولرم و مواد شوینده و پاک کردن آلودگی ها به طور کامل
۴. آبکشی و خشک کردن (برای تضمین غلظت محلول ضد عفونی کننده از خشک بودن آمبویگ اطمینان حاصل کنید)
۵. غوطه ور کردن قطعات در محلول ضد عفونی کننده سطح بالا به مدت لازم (مطابق دستورالعمل مواد ضد عفونی کننده موجود در بخش)
۶. آبکشی نهایی با آب فراوان، خشک کردن و اتصال قطعات

دستورالعمل نحوه شستشو و ضد عفونی لارنگوسکوپ

تیغه های لارنگوسکوپ از ابزار نیمه بحرانی محسوب شده و پس از استفاده، جهت آماده سازی برای استفاده های بعدی نیاز به استریلیزاسیون و در صورت عدم امکان، حداقل ضد عفونی با محلول سطح بالا دارند.



مراحل آماده سازی تیغه های لارنگوسکوپ به شرح ذیل می باشد:



۱. پوشیدن وسایل حفاظت فردی مناسب
 ۲. جدا کردن دسته و تیغه
- برای نظافت تیغه لارنگوسکوپ:
۱. شستشوی تیغه با استفاده از برس و آب سرد و ماده شوینده به طور کامل
 ۲. آبکشی تیغه و خشک کردن (برای تضمین غلظت محلول ضد عفونی کننده باید از خشک بودن لارنگوسکوپ اطمینان حاصل نمود)
 ۳. غوطه ور کردن تیغه در محلول ضد عفونی کننده سطح بالا به مدت لازم (طبق دستورالعمل مواد ضد عفونی کننده)
 ۴. آبکشی نهایی با آب فراوان و خشک کردن با گاز استریل
 ۵. در صورت عدم استفاده از آب استریل، بعد از آبکشی با الکل مجدداً ضد عفونی شود.

➤ برای نظافت دسته لارنگوسکوپ:

- ✓ با استفاده از گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد، کاملاً تمیز و ضد عفونی گردد.
- ✓ از غوطه ور کردن دسته در محلول خودداری شود.

واحد کنترل عفونت - آموزش سلامت