

تست سوآپینگ:


این تست برای سنجش ماده موثره گلو تار آلدئید (که باید بیشتر از ۲,۵ درصد باشد) در محلول های ضد عفونی سطح بالا به کار می رود.

کورسولکس از جمله محلول های ضد عفونی سطح بالا است که برای ضد عفونی برونکوسکوپ، لاپاروسکوپ و سایر اندوسکوپ ها و همچنین ضد عفونی ابزار حیاتی به کار می رود.

با توجه به ماندگاری ۲۸ روزه کورسولکس و تعدد دفعات ضد عفونی، لازم است اثر بخشی محلول با نوار تست سوآپینگ بررسی شود.

تغییرات نوار تست مطابق راهنمای انجام تست، کار آیی یا عدم کارایی محلول کورسولکس را طی این ۲۸ روز نشان خواهد داد.

میزان دفعات انجام تست سوآپینگ بستگی به میزان مصرف محلول کورسولکس دارد که بیشتر به صورت رندوم توصیه می شود.

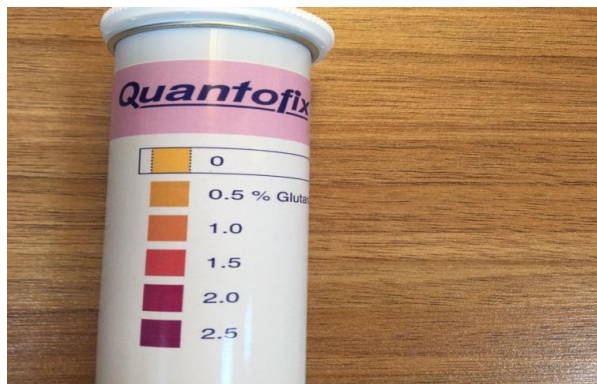

نحوه انجام تست: نوار تست را به مدت ۱۵ ثانیه داخل محلول کورسولکس قرار داده و تغییرات آنرا مطابق راهنما (شکل روبرو) بررسی کنید.

در صورت تغییر رنگ به طیف زرد محلول غیر قابل استفاده است.

اگر تغییر رنگ با خانه های شماره ۲ و ۲,۵ مطابقت داشته باشد محلول قابل استفاده است.